

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa Model: AR-026 COMPACT



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI PODPÓRKA REHABILITACYJNA 4-KOŁOWA ALUMINIOWA

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórce, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.



Uwagi i ostrzeżenia:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (4) są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwie strony ramy uchwytu (2) ustawione są na tej samej wysokości oraz skutecznie zablokowane
3. Sprawdzenie czy podpórka posiada wszystkie cztery koła (3) i (5)
4. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone / zamocowane (3) i (5)
5. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy podpórki są stabilnie ze sobą połączone (4)
6. Sprawdzenie czy blokada złożenia w ramie głównej jest skutecznie zablokowana (w otworze ramy)
7. Sprawdzenie czy śruby mocujące przednie koła (5) i tylne nogi z kołami (3) są solidnie przykręcone



W celu uniknięcia urazów:

1. Podpórka powinna być całkowicie rozłożona [blokada złożenia umieszczona w otworze ramy głównej]
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności podpórki przed użyciem
3. Obydwie strony ramy uchwytu (2) muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać podpórki tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
7. Każdorazowo podpórka powinna być trzymany oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące uchwyt, możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyt hamulca.
8. Podpórka nie może być narażona na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np.. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych)
9. Nie wolno przeciążać podpórki, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia torby na zakupy (5kg) oraz tacy (2kg)
11. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Sposób konserwacji:

Podpórkę należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Podpórkę należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe, elementy (koła, ręczki piankowe) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.


Harmonogram konserwacji:

Co tydzień Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi
Cyklicznie Sprawdź uchwyt pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruby przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć **Rocznie** Raz w roku wyślij swoją podpórkę do autoryzowanego serwisu, przeprowadź pełną kontrolę, czyszczenie, serwis i smarowanie wszystkich ruchomych części.


Przygotowanie do użycia:

Elementy składowe


1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania

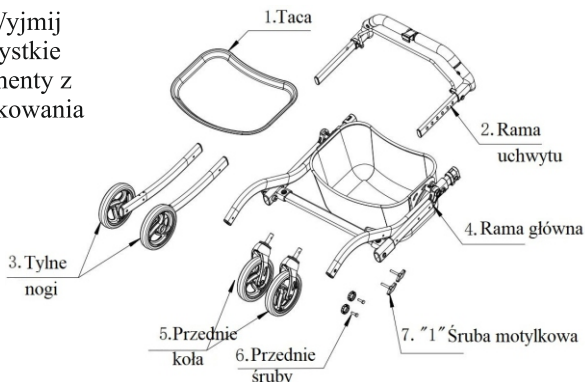


2. Weź ramę główną i otwórz ją, jak pokazano strzałkami. (Aby złożyć podpórkę należy pociągnąć blokadę boczną z okrągłą plastikową główką i zsunąć nogi).

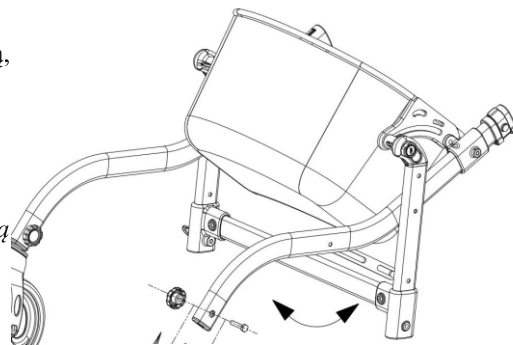


3. Włóż przednie koła do ramy

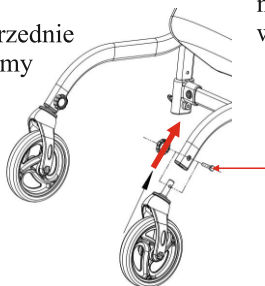


4. Włóż tylne nogi do ramy głównej, następnie włóż śruby w otwory i dokręć.

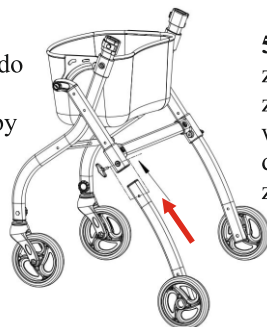


6. Umieść tacę na ramie głównej.

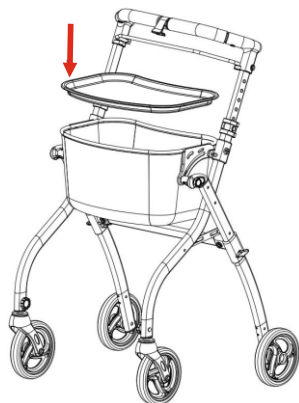

5. Najpierw odblokuj zaciski (jak na zdjęciu). Następnie włóż ramę uchwyty do ramy głównej i zablokuj zaciski.

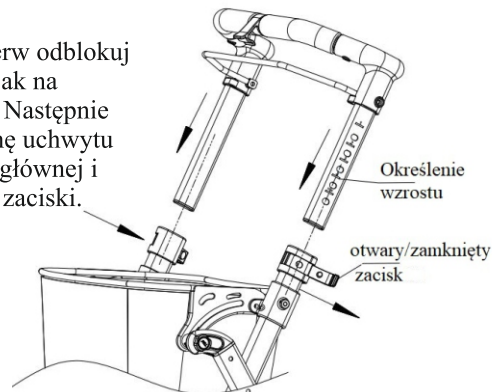

7. Uchwyty podpórki można regulować na wysokość, aby dopasować je do różnych użytkowników. Po prostu otwórz dwa zaciski i ustaw je na żądanej wysokości. Upewnij się, że obydwie strony są w tej samej wysokości. Zablokuj całkowicie zaciski.

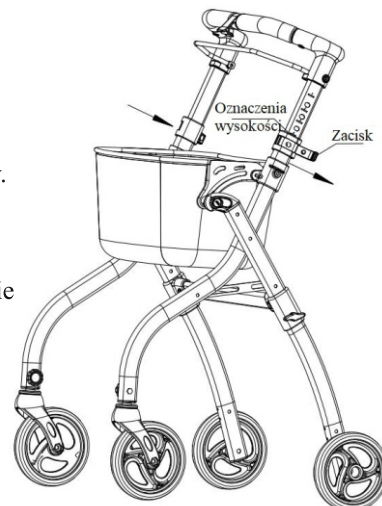

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie podpórki jest ZABRONIONE!!!

I. Podpórka jest nie stabilna.

- a. Czy obydwie strony ramy uchwyty (2) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy zaciski do regulacji uchwyty są solidnie zablokowane? Jeśli nie, należy je zablokować.
- c. Czy podpórka jest całkowicie rozłożona? Jeśli nie, należy ją rozłożyć aż do wskoczenia blokady w ramie
- d. Czy wszystkie koła są solidnie dokręcone/zamocowane? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić/zamocować.
- e. Czy wszystkie elementy ramy podpórki (4) są solidnie ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ PODPÓRKI!!!

Zakończenie użytkowania:

1. Zdejmij tacę a następnie złożź podpórkę zsuwając tylne i przednie koła ku sobie po wcześniejszym pociągnięciu blokady bocznej - nastąpi złożenie podpórki.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw podpórkę w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

PARAMETRY TECHNICZNE:	Model: AR-026
Rama: aluminiowa - składana	Wymiar całkowity szer. x dł: 58-60cm
Regulacja wysokości uchwytów: 85-98cm	Szerokość po złożeniu: 20cm
Koła: Średnica 6" (16cm), przednie koło skrętne	pełne, bezobsługowe, anty-poślizgowe PVC
Waga: 6,2kg	Maksymalna waga użytkownika: 108kg
Wypożyczenie standardowe: hamulec z funkcją postojową,	nylonowa, torba na zakupy, zapinana 40x36x23cm, taca, zdejmowana 40x27cm

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny

Zapoznaj
się z
instrukcją

Producent

Wyrób spełnia
wymagania
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /
serii

Data
produkcji
m-c/rok

Nadaje
się do
recyklingu

Selektywna
zbiórka
odpadów

KARTA GWARANCYJNA:

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu		
Nr LOT	Okres gwarancji	
	Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	TAK / NIE <i>niewłaściwe skreślić</i>
	NUMER EWIDENCYJNY ZLECENIA	

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa/pianki)
 6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podpórki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji podpórki, tacy oraz torby nylonowej na zakupy)
 7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
 8. **Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
 9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyтым stanie higienicznym.**

