

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA**

**Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa
z podparciem łokci
Model: AR-028 SUPPORT**



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODPÓRKA REHABILITACYJNA 4-KOŁOWA ALUMINIOWA Z PODPARCIEM ŁOKCI

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórcie, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.



Uwagi i ostrzeżenia:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (13) są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwa podłokietniki (9) ustawione są na tej samej wysokości oraz skutecznie zablokowane
3. Sprawdzenie czy podpórka posiada wszystkie cztery koła (7) i (12)
4. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone / zamocowane (7) i (12)
5. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy podpórki są stabilnie ze sobą połączone (13)
6. Sprawdzenie czy przyciski sprężynowe mocujące nogi z tylnymi kołami (12) znajdują się w otworach i są zablokowane
7. Sprawdzenie czy śruby mocujące przednie koła (7) są solidnie przykręcone



W celu uniknięcia urazów:

1. Podpórka powinna być całkowicie rozłożona [siedzisko całkowicie wyprostowane, nie ugięte w łuk]
 2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności podpórki przed użyciem
 3. Obydwa podłokietniki (9) muszą być ustawione na tej samej wysokości za pomocą przycisków (15)
 4. Używać podpórki tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
 5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni
 6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
 7. Każdorazowo podpórka powinna być trzymany oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące rączki, możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyt hamulca
 8. Podpórka nie może być narażona na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np.. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych)
 9. Nie wolno przeciążać podpórki, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
 10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia torby (4) na zakupy - MAX 3kg
 11. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem
- Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Sposób konserwacji:

Podpórkę należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Podpórkę należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe, elementy (koła, rączki) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Harmonogram konserwacji:

Co tydzień Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi

Cyklicznie Sprawdź uchwyty pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruby przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie” elementów pod kątem zużycia lub pęknięć **Rocznie** Raz w roku wyślij swoją podpórkę do autoryzowanego serwisu, przeprowadź pełną kontrolę, czyszczenie, serwis i smarowanie wszystkich ruchomych części.

Przygotowanie do użycia:

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania (wszystkie elementy podpórki widoczne na zdjęciu)



2. Weź przednie koło/a i umieść je tuleją w rurze




3. Włóż śrubę do otworu w górnej części rury / tulei koła i mocno przykręć śrubę z czarną nakrętką.



4. Chwyc element ramy z tylnym kołem i zamocuj nogę przyciskiem sprężynowym, upewniając się, że przycisk sprężynowy jest zablokowany we właściwej pozycji (w otworze ramy głównej)



5. Zamontuj układ hamulcowy na rurze podłokietnika, wyreguluj go na odpowiednią długość, a następnie dokręć i zamknij zacisk rury podłokietnika.

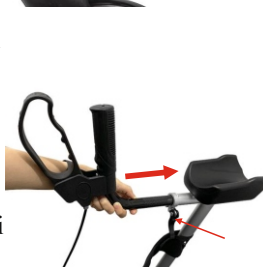

6. Zamontuj stojak na laskę / kulę na lewym wsporniku ramy głównej.



7. Przypnij linki zgodnie z osobistymi preferencjami.



Elementy składowe:

1. hamulec ręczny z blokadą postojową
2. regulowany podłokietnik
3. oparcie
4. torba na zakupy
5. śruba mocująca koła przednie
6. widelec przedni
7. koła 20cm (8'') PVC
8. rączki górne
9. podłokietnik z pianki PU
10. rączki dolne
11. siedzisko
12. noga z tylnym kołem, z hamulcem dociskowym
13. rama aluminiowa - główna
14. linki hamulców
15. przycisk do regulacji wysokości podłokietników



Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie podpórki jest ZABRONIONE!!!

I. Podpórka nie jest stabilna.

- a. Czy obydwa podłokietniki (9) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić (przycisk 15).
- b. Czy zaciski do regulacji rączek górnych (8) są solidnie zablokowane? Jeśli nie, należy je zabloковать.
- c. Czy podpórka jest całkowicie rozłożona? Jeśli nie, należy ją rozłożyć aż do całkowitego wyprostowania siedziska.
- d. Czy wszystkie koła są solidnie dokręcone/zamocowane? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić/zamocować.
- e. Czy wszystkie elementy ramy podpórki (13) są solidnie ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ PODPÓRKI!!!

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

Zakończenie użytkowania:

1. Zdejmij torbę a następnie złóż podpórkę zsuwając prawe i lewe koła ku sobie po wcześniejszym pociągnięciu za siedzisko ku górze. Ponadto opuść podłokietniki (9) do najniższego poziomu za pomocą przycisków (15).

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw podpórkę w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

PARAMETRY TECHNICZNE:	Model: AR-028
Rama: aluminiowa - składana	Wymiar całkowity szer. x dł: 62-70cm
Regulacja wysokości górnych uchwytów: 101-116cm Wysokość dolnych uchwytów: 67cm	Szerokość po złożeniu: 25cm
Koła: Średnica 8" (20cm), przednie koła skrętne	pełne, bezobsługowe, anty-poślizgowe PVC
Waga: 8,9kg	Maksymalna waga użytkownika: 136kg
Wypożyczenie standardowe: hamulec z funkcją postojową,	nylonowa torba na zakupy, zapinana 40x33x9cm, siedzisko 40x25cm, oparcie, stojak na kule/laskę

SYMBOLE:

								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA:

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy	
Nr faktury zakupu		
Nr LOT	Okres gwarancji	
	Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?	TAK / NIE <i>niewłaściwe skreślić</i>
	NUMER EWIDENCYJNY ZLECENIA	

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa/pianki)
 6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podpórki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji podpórki, torby nylonowej na zakupy)
 7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
 8. **Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
 9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyтым stanie higienicznym.**

